

# Obsluha AED boxu AIVIA

 **155**



volejte 155


kód je  
1234



operátor Vám sdělí  
kód pro otevření boxu



zadejte kód na  
klávesnici a potvrďte

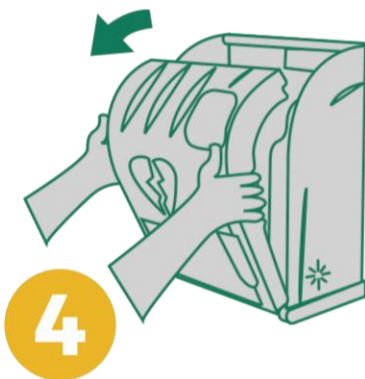

nyní lze box otevřít



vyjměte AED



po použití AED vraťte, zavřete  
box a kontaktujte obec

# První pomoc krok za krokem

1



## Zkontrolujte vědomí

Jemně postiženým zatřeste  
Hlasitě jej oslovte: „Jste v pořádku?“

2



## Pokud nereaguje

Zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy  
a zkontrolujte dýchání

Pokud nedýchá normálně  
nebo nedýchá vůbec


**Volejte 155 a přineste AED  
(pokud je k dispozici)**

Pokud normálně dýchá

\* Otočte postiženého do  
zotavovací polohy na boku

- Volejte 155
- Neustále kontrolujte, zda  
normálně dýchá

3

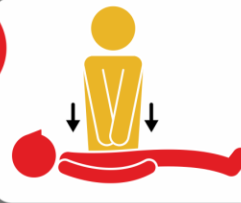

## Ihned zahajte resuscitaci

Položte svoje ruce na střed hrudníku  
Hrudník stlačujte do hloubky 5 - 6 cm  
frekvencí 100 - 120/min

4



## Zapněte AED a nalepte elektrody

Postupujte neprodleně podle hlasových pokynů přístroje  
Nalepte jednu elektrodu pod levé podpaží, nalepte druhou  
elektrodu pod pravou klíční kost, vpravo od hrudní kosti,  
tak jak je znázorněno na elektrodách. Pokud je na místě  
více zachránců, nepřerušujte KPR během nalepování ele.

5



## Odstupte a proved'te defibrilaci

Postiženého se nikdo nesmí dotýkat:

- během analýzy srdečního rytmu
- při defibrilačním výboji

Resuscitaci ukončete, pokud se postižený začne probouzet (hýbe se, otevírá oči a normálně dýchá). Pokud zůstává  
v bezvědomí a normálně dýchá, otočte jej do zotavovací polohy\*. Defibrilační elektrody ponechte nalepeny do příjezdu ZZS.

